

ネックスパックX

届出番号 12B1X00003NEXPA2

デンプン由来成分による止血効果と、上皮化促進作用による癒着防止効果の特長とする、ESSにおける充填素材です。鼻汁や粘膜の作用と1日3回の鼻洗浄によりゲル化し、7~10日程度で溶けて排出されます。加水前の厚さは2~4mmと薄いため、充填時に視野を妨げません。甲殻類アレルギーの患者にも使用可能です。



加水前

加水後



使い方


1



必要に応じて乾いた状態のネックスパックXを適当な大きさにカットします。

目安：XLサイズで1~2本程（両鼻）

2

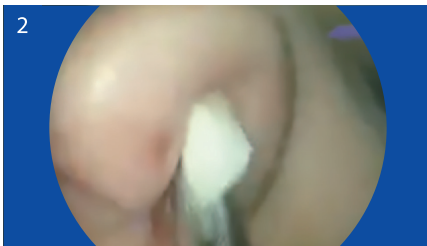

ネックスパックXを鼻腔内に挿入していきます。挿入前にできるだけ出血を止めておきます。

3



加水前に留置したい位置へ必要な分だけ貼り付けます。

ネックスパックXはドレッシング材のため、詰め込む必要はありません。

4



位置や量が問題ないか確認します。


5



生理食塩水で加水していきます。

Xサイズ：長さ約5cm / XLサイズ：長さ約7cm
加水の目安：1cmあたり、2mL

6

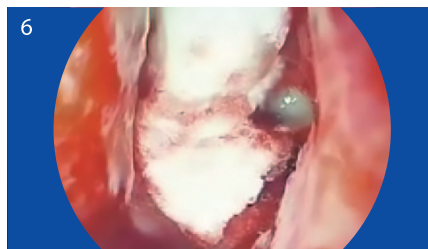

全体が膨潤していることを確認して完了です。

貼り付け時の注意点

膨潤後の位置調整は難しいため、水で膨らませる前に位置を調整してください。なお、無理に動かそうとするとちぎれる可能性があります。

留置後の管理

1日に2~3回の鼻洗浄を行ってください。ネックスパックX本体は、7~10日程度で溶け、鼻腔外へ排出されていきます。

製品番号	製品名	長さ	厚さ 加水前/加水後	入数	税抜定価	JANCD
9115026	ネックスパックX	約5cm	2mm/13mm	8枚/箱	56,000円	4562197243678
9112066	ネックスパックXL	約7cm	4mm/12mm		64,000円	4562197243685