



MAGAZINE

記事を探す



TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

日帰り内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理で、良好な上皮化を支援するネックスパックXの導入事例

導入事例

日帰り内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理で、 良好な上皮化を支援するネックスパックXの導 入事例

2026.07.29 #日帰り手術 #ネックスパックX #ESS



日帰りサージセンターの耳鼻咽喉科医師は、日帰りや短期滞在で行う内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）の術後管理に使用するドレッシング材を求めています。多様な鼻副鼻腔手術に対応するドレッシング材であること、上皮化が良好であることが評価されネックスパックXが採用された事例です。



導入先

日帰りサージセンターの耳鼻咽喉科医師

使用場面

日帰り、短期滞在で行う内視鏡下鼻副鼻腔手術

目的

内視鏡下鼻副鼻腔手術後の管理

1. 事例のご紹介

2. 許容したこと・注意点

3. お客様コメント

4. 使用製品

事例のご紹介

日帰りサージセンターの耳鼻咽喉科医師は、日帰りや短期滞在で行う内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）の術後管理に使用するドレッシング材を求めています。良質な手術の提供に向けて、選定にあたっては、①早く、きれいに治ること、②術後処置がミニマムであること、③術後出血が少ないこと、④術後疼痛が少ないことを重視しました。

多様な鼻副鼻腔手術に対応するドレッシング材であること、鼻洗浄をきちんとすれば残らず、上皮化もいいことが評価され採用されました。

挿入前に、ネックスパックXを縦に2つに切った上で使用。ネックスパックXの使用により、嗅裂、中鼻甲介の創面被覆による止血効果や、癒着防止効果が得られました。

許容したこと・注意点

- 圧迫止血としては弱く、抑えて止血したい時には不向きであること

お客様コメント

「術後毎日3回鼻洗浄をしている患者であれば、1週間後の再診時にはほとんど残っていない。残っている場合も、鼻洗浄を続けてもらえばいい感じに仕上がる」

使用製品

販売名：ネックスパックX

区分：一般医療機器

届出番号：12B1X00003NEXPA2

製造販売業者：株式会社名優

採用品番：9112066（ネックスパックXL）

この事例での役割：日帰り内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理で、良好な上皮化を支援

製品ページ：<https://meilleur.co.jp/product/dissolvable-nasal-packing/>

よくある質問

Q なぜネックスパックXが採用されたのですか？

A. 多様な鼻副鼻腔手術に対応すること、鼻洗浄をきちんとすれば残らず、上皮化も良好であることが評価されたためです。

Q 使用時に注意した点がありますか？

A. ネックスパックXはデンプン由来成分による止血効果の特長とする充填素材であり、圧迫止血としては弱い点です。

[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



製品カタログ一覧



お問い合わせ

