

## DETERGENT

## 洗剤

汚れを落とし、器材を傷めない。

医療器材に付着した汚れを分解して洗浄するには、タンパク質、脂肪、炭水化物などの成分を分解する酵素が含まれていなければなりません。

対象となる器材や、洗浄方法（用手洗浄、浸漬洗浄、超音波洗浄、ウォッシャーディスインフェクター（WD）など）によって、適切な洗剤を選択する必要があります。

## 高濃度多酵素洗剤

リパーゼ、アミラーゼ、プロテアーゼの3つの酵素が含まれた多酵素洗剤です。純中性なので、アルミニウムやステンレスなど、器材の素材を問わず使用できます。

推奨使用希釈が512～1280倍と高濃度なので経済的です。用手洗浄、浸漬洗浄、超音波洗浄、WDに使用できます。

## 【仕様】

- pH7±0.5
- 低発泡性
- 推奨使用温度 40～50度
- 推奨使用希釈 512～1280倍  
水1000ccに対し約0.8～1.9cc  
※ 汚れにより、濃度を調整してください。

## 【注意】

- ・医療器材の洗浄以外には使用しないでください。
- ・洗剤が皮膚についたり目の中に入らないようにお取り扱いください。
- ・目に接触した場合は流水で15分間お流しください。
- ・一度使用した溶液は必ず廃棄してください。



高濃度で経済的！

約1ℓ

ボトル1本 9450ml



ボトル1本から  
約1000ℓ

の洗浄液をつくれます

512ℓ（希釈512倍の場合）～  
1280ℓ（希釈1280倍の場合）

製品番号	製品名	仕様	入数	税抜定価	JANCD
CSNC25E	高濃度多酵素洗剤	9,450ml	1本	65,000円	4562197234706
CSNC25GE	高濃度多酵素洗剤 1GAL	3,780ml	1本	30,000円	4562197235154

