

A blue square graphic with a white circle in the center. Inside the circle, the words "SAFETY" and "FIRST" are written in white, bold, sans-serif capital letters, stacked vertically. The "1" in "FIRST" is slightly larger and more prominent.

**SAFETY
FIRST**

【ご使用にあたり】

- 耳ひもが取り付けである面を顔側にして、ノーズフィッターを鼻のかたちに合わせ、装着してください。黄色の面が表です。
- マスク表面はヨウ素を用いた特殊加工しており、特徴的なにおいがあります。
- この特殊加工により、マスク表面に付着する菌やウイルスをコントロールする性能があります。

【ご注意】

- 製品の特性上、マスク表面に色むらができることがあります。性能には影響しません。
- ヨウ素過敏症の既往歴がある方は使用しないでください。
- において気分が悪くなった方は使用を中止してください。
- マスクを取り外した時は、チャック袋などに入れ衛生的に保管してください。

The logo for Triomed, featuring a stylized blue '3' icon to the left of the word "TRIOMED" in a bold, blue, sans-serif font.

TRIOMED™

TrioMed Active Surgical and Medical Mask
Self-cleaning **ANTIMICROBIAL** protection
TrioMed Aktive Chirurgische und Medizinische Maske
Selbstreinigender **ANTIMIKROBIELLER** Schutz

輸入販売元：株式会社 名優

EU: EN 14683 IIR
USA: ASTM F2100 LV3