

スウェーデンからやってきた、たのしい自己耳管通気方法

オトヴェント

Otovent

滲出性中耳炎とは


鼓膜の内側の中耳が陰圧となって、中耳内に水が貯まる状態のことです。

オトヴェントは

耳管（耳とのどをつなぐ管）を開き、中耳内圧と外気圧とを等しくする働きがあります。



日本特許 第3209787号
一般医療機器 届出番号12B1X00003ABIGOM

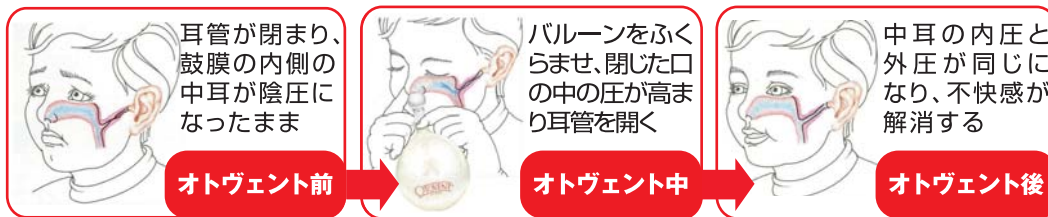

- オトヴェントは朝晩2回～朝昼晩3回、2～3週間連続して使用して下さい。
- 新しいバルーンは子どもにふくらましにくいことがあります。最初はバルーンを伸ばしたり、少し口でふくらませて、使いやすくしてもかまいません。
- バルーンは20回ふくらませた後は捨てて下さい。効果がなくなります。
- グレープフルーツ大より大きくふくらませると、バルーンの寿命が短くなります。
- 風邪をひいて、ひどく鼻汁が出ているときには使用しないで下さい。
- バルーンに天然ゴムを使用。天然ゴムに過敏な方は使用しないで下さい。
- 専用のバルーン以外は鼓膜を傷害する恐れがあるので、使用しないで下さい。



使用方法

1. ノーズピースとバルーンとをつなぎます。
2. 息を深く吸い込んで口を閉じ、片側の鼻の孔を指でふさぎます。
3. ノーズピースを鼻の孔にしっかりとあてます。
4. 口を閉じたままゆっくりと息を吹き込みます。
5. グレープフルーツ大の大きさまでふくらませるのが目安です。



ダイビングの耳抜き改善、航空性中耳炎予防、高気圧酸素治療中の耳痛予防にも役立ちます。

動画による使用方法などの詳細資料を弊社公式サイト内にてご案内しております。

<http://www.meilleur.co.jp/otovent>

詳細は Google、動画は Youtube で検索！

Movie
動画公開中！

価格表

商品番号	商品名	仕様	税抜価格
OTOVENT	オトヴェント 1×5	ノーズピース 1 個、バルーン 5 個	2,000 円
OTVNT110	オトヴェント 1×10	ノーズピース 1 個、バルーン 10 個	2,500 円
OTVENTB5	バルーンのみ	バルーン 5 個 / 袋	1,000 円

※バルーンのみのご注文は 2 袋以上からとさせていただきます。



～ YouTube 公開動画 収録内容のご紹介 ～ 動画でわかるオトヴェントによる自己耳管通気

1 滲出性中耳炎について



▲本人と家族への問診



▲炎症の状態を確認中




▲中耳内の様子の解説

2 オトヴェントについて



▲オトヴェントの説明

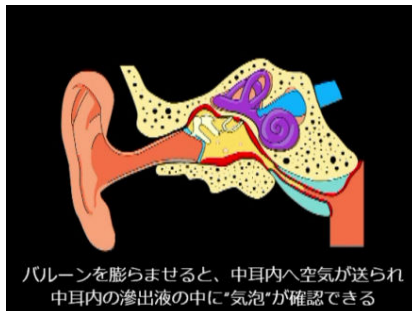

▲オトヴェントの解説



▲オトヴェントの解説

3 オトヴェントの使い方



▲まず親が見本を見せる



▲医師サポートでトライ



▲本人のみでトライ

動画の視聴は、YouTube 検索

オトヴェント



★ 本動画の他、ダイビングの耳抜き不良予防・航空性中耳炎予防のための動画も公開中 ★