

# Cアームドレープ

## 透視用Cアーム用滅菌ドレープ

- 下準備を必要とするのは初回だけです。
- アーム部分のドレープに要する時間は数分です。
- アームの旋回を妨げることはないドレーピングができます。

### 装着後全体像

汎用型バンディッドバッグとアーム用ドレープの組合せ AE5741SR でご利用になるといっそうお得です。



## 下準備

1



下準備用ドレープのペロクロの裏のシールを剥がし、アーム側に貼り付けていきます。

2



ペロクロを側面に貼り終えた後、ドレープだけを取り外します。

## ドレーピング 1

3



無菌的に開封したドレープをペロクロに合わせて装着していきます。

4



不潔にならぬよう注意してアームの下までドレープを伸ばしていきます。

5



ドレープが長すぎる場合はX線管球部分で折り返します。

## ドレーピング 2

6



I. I. に汎用型バンディッドバッグを被せません。

7



バンディッドバッグがアームドレープに重なるように被せません。

8



バンディッドバッグのシールを剥がし、たるみをまとめます。管球部分も同じようにします。

商品番号	商品名	仕様	単位	税抜価格
AE5741	アーム用ドレープ	41cm×208cm	25枚/箱	50,000円
63620RT	汎用型	長さ91cm x 幅51cm	25枚/箱	17,000円
63630RT	汎用型	長さ91cm x 幅76cm	25枚/箱	17,000円
AE5741SR	お徳用セット	・ AE5741 ・ 63620RT または 63630RT	25枚 50枚	75,000円