


I.D.ブレスレット

— 取り違え事故防止に —

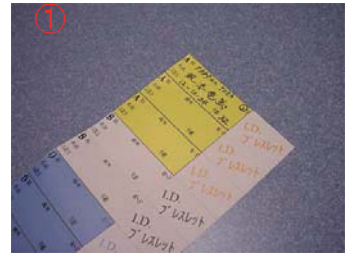

添付マーカーで直接
ブレスレットに書き
込みができます



特長

- ・血液型の国際規格に準じたカラーコーディングを採用しています。
- ・ハサミ等で切らない限りはずせない特殊ホックを採用しています。
- ・患者さんの氏名等、必要な情報をタブに書き込んで使用します。
- ・丈夫で肌に優しい素材でできているため長期間使用できます。
- ・タブを使用せずブレスレットに直に書き込むこともできます。
- ・新生児から成人まで共通で使用できます。

使用方法

1. 患者さんに合った血液型のタブを選びます。
2. ボールペン等で必要事項をタブに書き込みます。
3. タブをI.D.ブレスレットのスペース部分に差し込みます。
4. 差し込んだタブを押さえ、つまみ部分をちぎり取ります。
5. オスのホックに適切な孔を通しメスのホックで押さえます。
6. 余った部分はハサミで切り落とします。

製品番号	製品名・仕様	単位	税抜価格
ID10456	I.D.ブレスレット 100本/箱	箱	¥5,000
ID10546	I.D.ブレスレット 100本/箱 血液型タブ付	箱	¥6,000
ID10640	I.D.ブレスレット ベビー ピンク100本/箱	箱	¥5,000
ID10641	I.D.ブレスレット ベビー ブルー100本/箱	箱	¥5,000

※ 2箱以上でご注文願います。ベビー用には血液型別カラータブ付製品はございません。