

● 高圧蒸気滅菌用 (STEAM)

培養：温度55~60℃ × 24時間
 指標菌：G. Stearothermophilus (ATCC®7953)

未使用・未培養



ラベル
青色

培養液
紫色

陰性 (OK)



ラベル
茶色

培養液
紫色

陽性 (NG)



ラベル
茶色

培養液
黄色

対照試験



ラベル
青色

培養液
黄色

● EOG滅菌用 (EO)

培養：温度33~37℃ × 48時間
 指標菌：B. Atrophaeus (ATCC®9372)

未使用・未培養



ラベル
青色

培養液
青緑色

陰性 (OK)



ラベル
緑色

培養液
青緑色

陽性 (NG)



ラベル
緑色

培養液
橙色

対照試験



ラベル
青色

培養液
橙色

● ホルムアルデヒド滅菌用 (FORM)

培養：温度55~60℃ × 48時間
 指標菌：G. Stearothermophilus (ATCC®7953)

未使用・未培養



ラベル
黄色

培養液
紫色

陰性 (OK)



ラベル
茶色

培養液
紫色

陽性 (NG)



ラベル
茶色

培養液
黄色

対照試験



ラベル
黄色

培養液
黄色

● 過酸化水素ガス滅菌用 (VH202)

培養：温度55~60℃ × 24時間
 指標菌：G. Stearothermophilus (ATCC®7953)

未使用・未培養



ラベル
青色

培養液
紫色

陰性 (OK)



ラベル
緑色

培養液
紫色

陽性 (NG)



ラベル
緑色

培養液
黄色

対照試験



ラベル
青色

培養液
黄色