

吸引しないドレッシング材

ネックスパックX NexPakX

- 術後の鼻洗浄により、**完全に溶けて排出**されます。
- 術後出血を回避したい**日帰りの手術**などにもおすすめです。

※1
ネックスパックXは、圧迫によらない止血効果と
上皮化促進作用による癒着防止効果の特徴とする、
ESSにおける充填素材です。



- 術部に合わせてカットできます。
- デンプン由来のため、安心・安全。ラテックスフリー。
- 生理食塩水等で加水すると即座に膨らみます。
- 粘膜の作用と**1日3回の鼻洗浄**によりゲル化し、**7～10日程**で溶けて排出されます。

※2

※1 デンプン由来成分による止血効果

血漿蛋白のような高分子及び血球成分を
吸収せず、水や低分子量物質を優先的に
吸収するため、血液凝固因子が濃縮されて
止血を促進する効果があります。

※2 患者の状態によって日数は前後します。

加水前



加水後



加水の目安

製品 1cm あたり 2mL

《手術後の鼻洗浄には》
鼻洗浄器 EMSハナ通り®

水圧を自分で調整でき、2通りの鼻うがいができる鼻洗浄器です。

- ・重力により自然圧でやさしく洗う
- ・ぐっと握って奥までしっかり洗う

品番：530465
内容：鼻洗浄器1台、専用塩4袋/箱
定価：1,480円(税抜)

食洗機で洗えるのでお手入れも簡単です。

たっぷり
大容量/
250cc



製品名	品番	長さ	厚み→膨潤時厚み	入数	税抜定価
ネックスパックX	9115026	約 5 cm	2.5mm→13mm	8 枚入/箱	56,000 円
ネックスパックXL	9112066	約 7 cm	4mm→12mm	8 枚入/箱	64,000 円

〔製造元〕 Hemostasis LLC (アメリカ)

Meilleur
m e i j u

〔製造販売業者〕

株式会社 名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2
TEL:047-480-6161 <https://www.meilleur.co.jp>



お問い合わせは左の二次元バーコードか、
お電話にてご連絡ください。

ネックスパックX 使用方法




1 必要に応じて、乾いた状態のネックスパックXを適当な大きさにカットします。

目安：XLサイズで1～2本程（両鼻）




2 ネックスパックXを鼻腔内に挿入していきます。

❗ 挿入前にできるだけ出血を止めておきます。

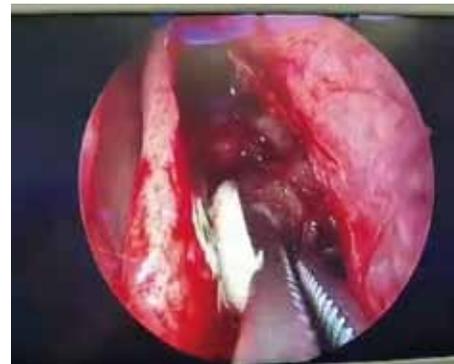


3 挿入したネックスパックXを留置したい位置に貼り付けます。

❗ 貼り付ける前に加水しないでください。

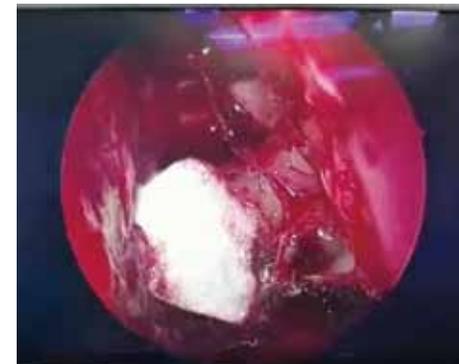

4 位置を調整しながら貼り付けていきます。

❗ 膨潤後の位置調整は難しいので加水前に位置を調整します。

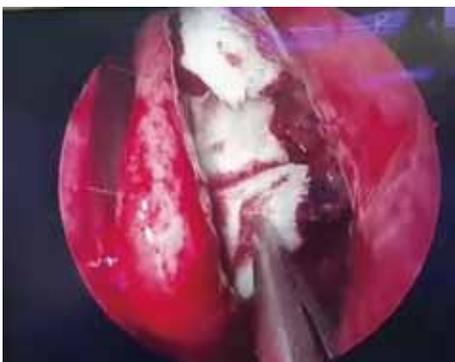

5 同様に必要な分だけ貼り付けます。

❗ ネックスパックXはパッキング材ではなくドレッシング材なので、詰め込む必要はありません。




6 位置や量が問題ないかどうか確認します。



7 生理食塩水で加水していきます。

加水の目安：1cmあたり、2mL

Xサイズ：長さ約5cm
XLサイズ：長さ約7cm

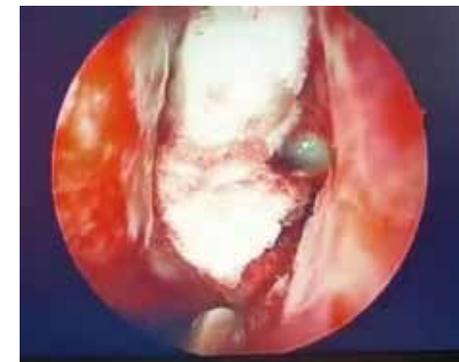

8 全体が膨潤していることを確認して完了です。



[youtube]

◀ 使用方法を動画でご覧いただけます

貼り付け時の注意点

膨潤後の位置調整は難しいため、**膨らませる前に位置を調整してください。**



無理に動かそうとすると、ちぎれてしまう可能性があります。

留置後の管理

1日に2～3回の鼻洗浄により、7～10日程度で溶けていきます。

