

デンバーズプリント




■ 7 ~ 10 日間の長期固定用です。
 ■ 汚れがつきにくく、耐水性に優れています。
 届出番号：12B1X00003DENVER
 使用目的：鼻骨整復後の副木として使用
 特定保険医療材料
 056 副木 (2) 形状賦形型 ④ 鼻骨用
 償還価格：5,140円

製品番号	品名	内容	包装単位	税抜価格
DS1500NM	D/S 1500 ミニ	アルミ製スプリント ベロクロパッド センターパッド (各1個)	1組	4,800円
DS1500NP	D/S 1500 プティ			
DS1500NS	D/S 1500 スモール			
DS1500NL	D/S 1500 ラージ			
DS1500RM	D/S レギュラー 1500 ミニ	アルミ製スプリント ベロクロパッド センターパッド アルコールパッド スキンプレップ 保護テープ (各1個)	1組	8,000円
DS1500RP	D/S レギュラー 1500 プティ			
DS1500RS	D/S レギュラー 1500 スモール			
DS1500RL	D/S レギュラー 1500 ラージ			
DS1500KM	D/S レギュラー 1500 キットミニ	アルミ製スプリント ベロクロパッド センターパッド アルコールパッド スキンプレップ 保護テープ (各1個) サージカルスポンジ (2本)	1組	10,000円
DS1500KP	D/S レギュラー 1500 キットプティ			
DS1500KS	D/S レギュラー 1500 キットスモール			
DS1500KL	D/S レギュラー 1500 キットラージ			

使用方法

- アルコールパッドを使い、患部を清拭し、充分乾かします。
- テープのつきがよくなるように、スキンプレップで患部を拭い、乾かします。
- 端が重なり合うようにテープを貼ります。
- 皮膚に触れないように注意しながら、センターパッドを鼻背にそって貼ります。

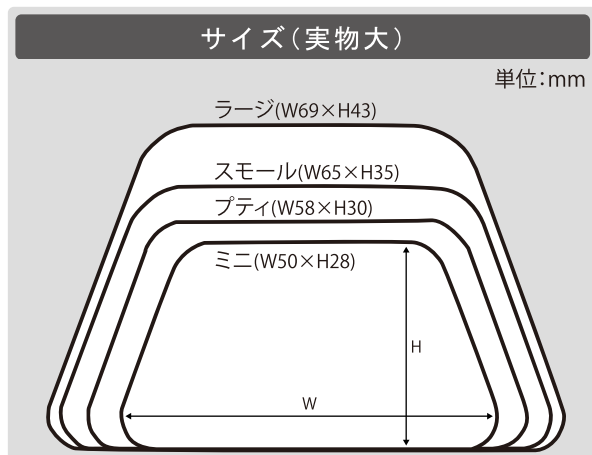

- ベロクロパッドのシールをはがし、テープの上から貼ります。
- アルミ製スプリントの固定面を下にし、ベロクロパッドの上から当て、形を整えます。
 スプリントを皮膚に接触させたり、締めつけ過ぎたりしないように注意して下さい。