

echō IITM

電気式人工喉頭 エコー II



特長

- ✓ 音量・音の高さ調整が簡単
- ✓ 1回の充電で4時間使用可能
- ✓ バッテリー込みで97gと最軽量
- ✓ 充電器・口腔チューブ付
- ✓ 出荷後3年間の品質保証

販売元

株式会社名優 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
Tel: 047-480-6161 Fax: 047-480-6162 <http://www.meilleur.co.jp>

エコーⅡは、日常生活用具給付対象品です

ボディカラーは黒・グレーの2色

バッテリー残量が20%未満になると点滅します。

スイッチを押してから、“UPボタン”を3秒押し続けると“P表示”が点滅します。

“P表示”が点滅中に“UPボタン”と“DOWNボタン”を押して音の高さを調整し、最後にスイッチを押して決定します。

直径34mm、全長95mm、重量97g (バッテリー込) で超コンパクト

●ヘッド部

スイッチを押すと振動音が発生します。あごの下の色々な場所にヘッド部を当て音がよく響く箇所を探します。見つかったら、話したい言葉に合わせ口と舌を動かし発話します。

●スイッチ

スイッチを押してから“DOWNボタン”を3秒押し続けると“V表示”が点灯します。

“V表示”が点滅中に“UPボタン”と“DOWNボタン”を押して音量を調整し、最後にスイッチを押して決定します。

●バッテリー表示

●UPボタン

●P表示(音の高さ)

●DOWNボタン

●V表示(音量)

※スイッチ、UPボタン、DOWNボタンを同時に3秒間押し続けると出荷時モードに戻ります。

【エコーⅡのセット内容】

本体	1台
専用バッテリー	2個(9Vタイプ・リチウム)
専用充電器	1個
口腔チューブ	5本
アダプター	1個
ストラップ	1本
専用バッグ	1個

定価：¥70,000 (非課税)

●本体内部の-と+の表示にバッテリー表示を合わせて差し込んでください。充電器も同様です。



発話に習熟するために

エコーⅡを使いこなすには練習が必要です。発話法は発声教室で学ぶことをお勧めします。発声教室の詳細につきましては、日本喉摘者団体連合会までお問い合わせください。

〒105-0004 港区新橋5-7-13 ビュロー新橋901 TEL ; 03-3436-1820 FAX : 03-3436-3497

発話の仕組みについて

スイッチを押すと、電磁気作用でヘッド部(振動板)がブザーのような音が発生し、あごの下あたりに直接当てると、口腔内へ伝わります。この原音の発生時に、発話しようとする口の形や舌の動きに合わせて、同様の発音がされます。

ヘッド部を当てる位置が右側であれば右手、左側であれば左手に持って使用します。スイッチは口を動かす時だけ入れ、軽く押し当てます。

押し当てる箇所を変えてみると、ある箇所ではガーガーと音を外にはじかれ、またある箇所では、音がジージーと皮膚を介して内部へ染み込んでいきます。一般的に癬痕化して硬く厚くなっているところよりも比較的軟らかで平らなところ、つまり振動板がうまく密着する箇所に合わせて使用します。