

# 電気式人工喉頭を楽しむ

発話から歌唱まで

*Inspiration*

インスピレーション

## 特長

- ✓ USB充電
- ✓ スイッチモード選択
- ✓ イントネーション機能

価格：¥75,000（非課税）

販売元

株式会社名優 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2  
Tel: 047-480-6161 Fax: 047-480-6162 <http://www.meilleur.co.jp>

# 各部名称および機能

**振動部**

- 喉のもっとも柔らかく密着する箇所に当て、音源とします。



**③スライダー インジケータ**

- 充電量を確認します。
- 指で触れボリューム、音程を調整できます。



**充電・赤色点灯**

- 充電中点灯

**緑色点灯**

- USB接続時

**インジケータ**

- 段階的に緑に点滅します。
- 充電状態を示します。



**①スイッチ**

- 充電確認時 2秒押し

**USB接続部**

**品質保証シール**

- 剥がれると保証が無効

**②FB（機能ボタン）**

- モード設定時長押し
- 充電確認時 2秒押し


1

喉に当てると作動、発話...

● ● ● ● 初期設定

**【設定】**

1. ①スイッチをOFFにして電源を切る
2. ②FBを押しながら①スイッチをONにして、3秒待つ
3. ③のインジケータが赤く点滅、1つめの緑が点滅したなら②FBを離す
4. 設定確認ブザーが鳴る

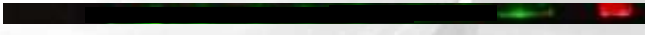


● インジケータ

2

スライダーに触れると作動...

**【設定】**

1. ①スイッチをOFFにして電源を切る
2. ②FBを押しながら①スイッチをONにして、6秒待つ
3. ③のインジケータが赤く点滅、2つめの緑が点滅したなら②FBを離す
4. 設定確認ブザーが鳴る

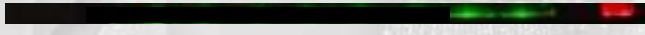

● インジケータ

※音量調整など、その他設定につきましてはホームページをご覧ください。

**充電方法**

同梱された充電器のUSBケーブルを接続します。充電中はUSB端子ちかくの緑のインジケータと赤のインジケータ両方が点灯します。充電時間はおよそ4時間です。フル充電するとインジケータの赤が消えます。フル充電後、20～24時間使用できます。

ONにした状態でFBを2秒押し続けると充電状態を確認できます。緑のインジケータ8つ全てが点灯しているとフル充電。緑のインジケータの数が少なくなるにつれ、残量が少なくなっています。残りわずかになると赤のインジケータも点灯します。