

モードを変更し、もっと電気式人工喉頭 *Inspiration* を楽しむことができます

①スイッチ

②FB（機能ボタン）



③スライダー インジケータ



モード設定方法

- 1) ①をOFFにして電源を切る
 - 2) ②のFBを押したまま①をONにして待機する。
 - 3) ③のインジケータ(緑色)が設定したいモード数に達したら②のFBを離す。
 - 4) 設定確認ブザーが鳴る。
- ※モード設定中は③のインジケータが赤色に点滅します。

発話設定
モード 1



待機時間

- ・ 振動部を喉に当てるとON、発話できます。
- ・ スライダーで音程調整ができます。
- ・ スライダーに触れた状態でFBを押したままにすると、スライダーでボリューム調整が可能になります。

約3秒

発話設定
モード 2



- ・ スライダーに触れるとON、発話できます。
- ・ スライダーで音程調整ができます。
- ・ スライダーに触れた状態でFBを押したままにすると、スライダーでボリューム調整が可能になります。

約6秒

**発話設定
モード 3**

- ・ 振動部を喉に当てるとON、発話できます。
- ・ スライダーでボリューム調整ができます。
- ・ スライダーに触れた状態でFBを押したままにすると、スライダーで音程調整が可能になります。

約9秒

**発話設定
モード 4**

- ・ スライダーに触れるとON、発話できます。
- ・ スライダーでボリューム調整ができます。
- ・ スライダーに触れた状態でFBを押したままにすると、スライダーで音程調整が可能になります。

約12秒

**基本設定
モード 5**

- ・ スライダーで基本音程を変更できます。

約15秒

**基本設定
モード 6**

- ・ スライダーで基本ボリュームを変更できます。

約18秒

**基本設定
モード 7**

- ・ デフォルト（出荷時の設定）に戻します。

約21秒

