

# パテコレクター/イヤードレッシングキット



パテコレクター

## 特 徴

本品をサクションラインに接続して使用することで骨パテの採集がきわめて簡単になります。

## 滅 菌

**パテコレクター本体のみ**ガス滅菌又は低温プラズマ滅菌ができます。高圧蒸気滅菌はできません。

(※パテスクリーンはディスポーザブルです。)

## 洗 浄

本体は湯に入れて、非油性洗剤で洗浄することができます。洗浄後は十分に洗い落としてください。

## 使用方法

1. 本体のベースにステンレス製パテスクリーンを装着します。
2. 本体に矢印で示されている方向にサクションラインを接続します。
3. ベースを外して、採集した骨パテをあけます。

製品番号	製品名	税抜価格	製品番号	製品名	税抜価格
P-200	パテコレクター (本体1個 パテスクリーン1個/袋)	¥20,000	P-201	パテスクリーン (6個/袋)	¥15,000



イヤードレッシングキット

## 特 徴

- ・マストイド、耳介の手術後のドレッシングが簡単になります。
- ・カップが患部を確実に保護します。
- ・長めのベロクロファスナーで調節が簡単です。
- ・3種の大きさより選べます。
- ・マストイドドレッシングがついています。

## 使用方法

1. 伸縮性がない方のベルトを額に当てます。
  2. カップを耳に当てます。
  3. ベロクロファスナー（マジックテープ）でベルトを留めます。きつく締めすぎないように注意します。
- ※マストイドドレッシングは必要に応じ使用してください。保護紙を剥がして、カップ周囲の粘着テープも使用できます。

製品番号	製品名	単位	税抜価格
B-500-A	グラスコック・イヤードレッシングキット(成人用、カップ内径 11.5cm) 同上 (5個/箱)	個 箱	¥5,000 ¥21,000
B-500-M	グラスコック・イヤードレッシングキット(成人用、カップ内径 9.5cm) 同上 (5個/箱)	個 箱	¥5,000 ¥21,000
B-500-P	グラスコック・イヤードレッシングキット(小児用、カップ内径 7.0cm) 同上 (5個/箱)	個 箱	¥5,000 ¥21,000

※製品の性質上、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。



製造販売業者：株式会社名優  
TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2  
http://www.meilleur.co.jp