

インフューサージ・インフスタット


使い始めた人から楽になる加圧バック

● 特長

- 優れた操作性。片手で簡単に操作できます。
エア漏れがなく、必要な圧力を長時間維持できます。
本体上部の輪をIVポールに簡単にかけられます。
(インフューサージ500cc,1000ccのみ)
- 高い安全性。膨らましすぎによる破裂がありません。
安全弁が自動的に過剰圧力を排します。
- ラテックスフリー。
- 優れた経済性。
- 色で見分ける圧力ゲージで、離れた場所からでも視認できます。



裏面が透明ビニルタイプもあります

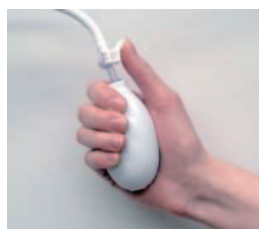

● 使い方

1. 輸液用ソフトバッグを本体と裏側のメッシュ部との間に入れます。
2. 輸液用ソフトバッグ上部の孔にひもループを通します。
フック付の場合(インフューサージ500cc,1000ccのみ)は、
輸液用ソフトバッグ上部の孔をフックに掛けます。
3. 三方活栓のつまみを3時の位置に合わせ、送気球を手動で操作し加圧します。
4. 適正圧に達していることを圧力ゲージで確認します。
5. 三方活栓のつまみを12時の位置に回し、圧力を維持します。
6. 脱気するときには、三方活栓のつまみを6時の位置に回します。

商品番号	商品名	単位	税抜価格
ETHO4005	インフューサージ加圧バッグ 500cc 用	5 個 / 箱	18,000 円
ETHO4050	インフューサージ加圧バック透明タイプ500cc用		20,000円
ETHO4010	インフューサージ加圧バッグ 1000cc 用		20,000 円
ETHO4100	インフューサージ加圧バック透明タイプ1000cc用		22,000円
ETHO4030	インフューサージ加圧バッグ 3000cc 用		28,000 円
MTM310W	インフスタット 1000cc 広幅 22cm	3 個 / 箱	12,000 円

インフューサージ加圧バック
インフスタット

届出番号：12B1X00003ETH003
届出番号：12B1X00003INFUST