

# Doc's Proplug

## ドクスプロプラグ

80歳近くになってもなお現役のサーファーである、Dr.スコットが理想の耳栓を求めて自ら開発に成功して以来、15年以上にわたり世界中で使われ続けている、きわめて信頼性の高い耳栓です。



左右1組 2,100円(税抜)

### 特徴

- 装着はわずか数秒。面倒がありません。
- カスタムメイドの耳栓よりも高い防水性。形状記憶製品のため、外耳道入口部をぴったりと密封します。
- 清潔な使用感。耳垢が付着してとれなくなることがありません。
- どの耳栓よりも高い安全性。挿入過ぎや異物化もなく、外耳道壁を傷つけることもありません。
- 快適な装着感。柔らかな非アレルギー性の素材を用いているため、長時間快適に使用できます。
- 優れた経済性。水に浮くため紛失のおそれが少なくてすみます。

### 適用

- 鼓膜切開や鼓膜チューブ留置術後  
の中耳炎治療時の水泳
- サーファーズイヤーの防止
- 騒音環境での鼓膜保護

### 使用方法

1. 大きく「L」と印字されているのが左耳、同じく「R」と印字されているのが右耳用です。
2. サイジングキットを用いるか、下記の表を参考にして、やや大きめのサイズを選びます。
3. 先がとがった部分を上にして、耳珠と対輪との間にきちんと収まるように装着します。
4. 装着後声を出してみても音がくぐもるように聞こえたなら適切にシールドされていることになります。
5. 取り外すときは、突起をつまんで引っ張ってください。
6. 汚れはアルコールで拭き取るか水洗いしてください。

商品番号	商品番号	サイズ目安(歳)	商品番号	商品番号	サイズ目安(歳)
PP1T	ドクスプロプラグ T	2以上	PP1M	ドクスプロプラグ M	12~17
PP1XS	ドクスプロプラグ XS	3~5	PP1L	ドクスプロプラグ L	18以上
PP1MS	ドクスプロプラグ MS	6~11	PP1XL	ドクスプロプラグ XL	
PP1S	ドクスプロプラグ S	6~17	PP1XXL	ドクスプロプラグ XXL	

\*お客様個人がご購入される場合をのぞき、ご注文は5組以上でお願いします。