

イヤードレッシング



特 徴

- ・マストイド、耳介の手術後のドレッシングが簡単になります。
- ・カップが患部を確実に保護します。
- ・長めのベロクロファスナーで調節が簡単です。
- ・3種の大きさより選べます。
- ・マストイドドレッシングがついています。

使用方法

1. 伸縮性がない方のベルトを額に当てます。
2. カップを耳に当てます。
3. ベロクロファスナー（マジックテープ）でベルトを留めます。きつく締めすぎないように注意します。

※マストイドドレッシングは必要に応じ使用してください。保護紙を剥がして、カップ周囲の粘着テープも使用できます。

製品番号	製品名	単位	税抜価格
B-500-A	グラスコック・イヤードレッシングキット（成人用、カップ内径 11.5cm）	個	¥5,000
	同上（5 個/箱）	箱	¥21,000
B-500-M	グラスコック・イヤードレッシングキット（成人用、カップ内径 9.5cm）	個	¥5,000
	同上（5 個/箱）	箱	¥21,000
B-500-P	グラスコック・イヤードレッシングキット（小児用、カップ内径 7.0cm）	個	¥5,000
	同上（5 個/箱）	箱	¥21,000

※製品の性質上、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。



製造販売業者：株式会社名優
TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2
<http://www.meilleur.co.jp>